

The Luxurious SA-3 | Der Luxuriöse SA-3

Stairmate SA-3 | Treppenkuli SA-3

The Stairclimber is an easy to use, portable wheelchair lift designed to attach under most manual wheelchairs. Stairmate's powerful motor allows a small attendant to safely transport a larger passenger up and down stairways. Stairclimber is suitable for indoor or outdoor use in public buildings and private homes. An affordable and reliable portable access solution.

Mit dem Treppenkuli ist das Überwinden von Treppen - im Freien oder im Haus - kein Problem mehr. Von nur einer Hilfsperson geführt erklimmen die Raupen des Treppenkulis gerade Treppen bis zu einer Steigung von 35°, ohne Kraftanstrengung, vollkommen sicher.



CAPACITY / TRAGLAST

160 kg


Attachement for special wheelchair

In combination with shoe attachment and multifunction clamp suitable for wheelchairs with folding detachable backrest, adjustable handle, hand brake lever or small wheelchairs 12 - 22 inch.

Arretierungshilfe für spezielle Rollstühle

In Kombination mit Unterstützungsschuhen und der Multifunktionsklammer geeignet für Rollstühle mit faltbarer Rückenlehne, abnehmbaren Griffen, Bremsrollstühlen sowie Kleinradrollstühlen von 300/400/500/550 mm Durchmesser.

Multifunction clamp
Multifunktionsklammer

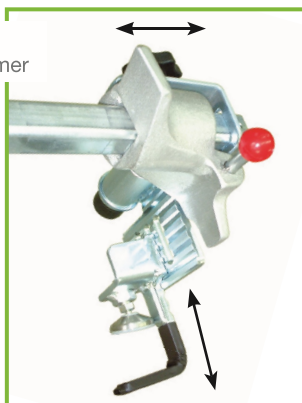


Easy transport in two parts
Leichter Transport in 2 Teilen



Power unit | Antriebseinheit


Shoe attachment
Unterstützungsschuhe

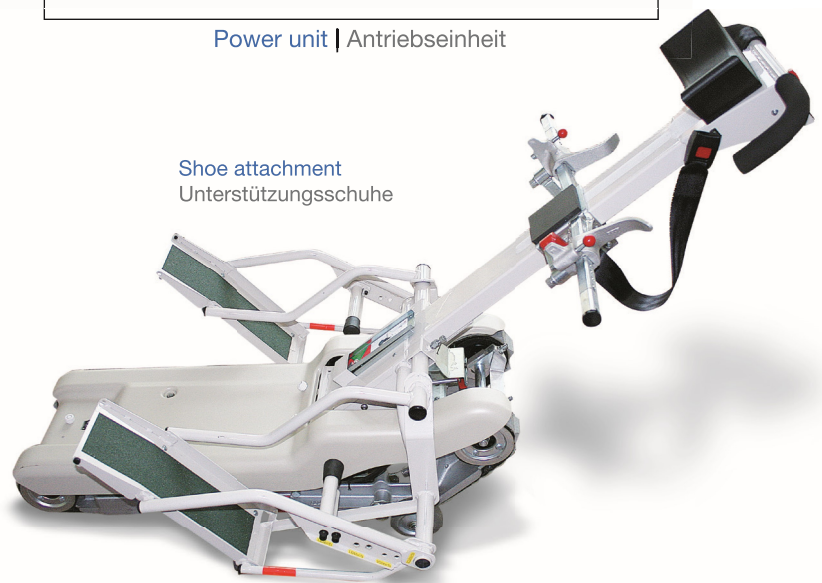


Minimum stair landing dimensions | Minimale Treppenabsatzmaße

Unit (mm)


Narrow Stairs | schmale Treppen

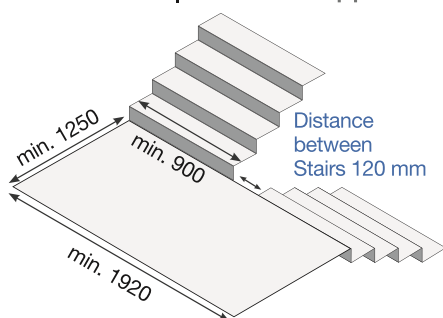

Wide Stairs | breite Treppen

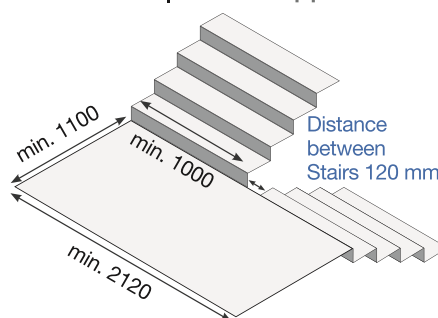

90° Stairs | 90° Treppe

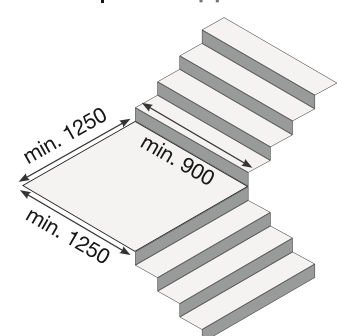

In case the width of stair is 900 mm, it may need a cut of the steering, i.e. to turn gradually with pushing machine forward and backward.
Bei einer Stufenbreite von 900 mm, muss das Gerät zur Drehung auf dem Absatz mehrmals vor und zurück bewegt werden.

The Luxurious SA-3 | Der Luxuriöse SA-3



Simply operating control button
Einfach arbeitende Bedienschalter



Magnetholder for safety belt
Magnethalter für Sicherheitsgurt

Good designed cover for safely operation easy to disassemble
Schützende Abdeckung für sichere Anwendung leicht zu demontieren


Incl. rechargeable batteries and charger (seperat)
Inkl. wiederaufladbarer Batterien und Ladegerät (seperat)

Treckless, safely, grey crawlers
Spurlos, sicher greifende graue Raupen

Stair gauge
Neigungsmesser

Loading socket for battery
Ladebuchse für Batterie

Flexible extension system allows any time the installation of wider wheelchair by yourself
Verbreiterungssystem ermöglicht jeder Zeit die Arretierung von breiteren Rollstühlen

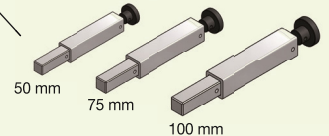

Plugged extension of slide arm
Aufsteckbare Verbreiterung des Holms



Extension of supporting pipe by thread
Schraubbare Verbreiterung der Radauflage



Start position
Ausgangsposition



Move the wheelchair over Stairmate
Rollstuhl über den Treppenkuli fahren



Attach Stairmate to the wheelchair
Rollstuhl verriegeln



Fasten the seat belt
Sicherheitsgurt anlegen



Tip passenger together with wheelchair until it clicks and move him to stairway
Passagier mit Rollstuhl kippen bis es einrastet und zur Treppe fahren

Specification Spezifikation		SA-3
capacity Traglast	kg	160 (135 with shoe attachment)
measurements Maße L/B/H	mm	1486 x 690 (with shoe attachment 780) x 918
weight Leergewicht	kg	65
power Motorleistung		210W / 30 min. rated output
battery Batterie		valve regulated lead-acid battery 2 x 6 V / 20 Ah / 20HR
speed Geschwindigkeit	upstairs aufwärts downstairs abwärts	6,5 m / min. 10 m / min.
stair angle Treppensteigung max.		35°
brakes Bremsen		Power off activated electromagnetic brake
battery load controll Batterieentladeanzeige		inkl.
	Order-No. Artikel-Nr.	333.600
Accessories Zubehör		
autom. charger autom. Ladegerät	12 V / 2,5 A	Order-No. Artikel-Nr. 333.252
Junior-platform Junior-Plattform		Order-No. Artikel-Nr. 135.331
Shoe attachment incl. multifunction clamp Unterstützungsschuhe inkl. Multifunktionsklammer		Order-No. Artikel-Nr. 333.601

Distribution Partners | Vertriebspartner

